

手背屈装具硬性

(製品名:リストZ)

取扱説明書

日本特許 No. 3911645
意匠登録 No. 1015642
商標登録 No. 4306245

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- ▶ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- ▶ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- ▶ 本装具の使用により過度の圧迫による痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士にご相談ください。
- ▶ 使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ▶ 痛みや傷がある場合は使用しないでください。
- ▶ 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止めください。


注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- ▶ 装着前に必ず本体等に異常がないか確認してください。
- ▶ 装着の際は、前後、左右、表裏を確認し装着してください。
- ▶ 装具の圧迫が気になる部分には、付属のパッド(粘着付)をご使用下さい。改善されない場合は医師または義肢装具士にご相談ください。
- ▶ 長期間使用する過程で形状が変わる可能性があります。フィット性や背屈角度の調整は、医師または義肢装具士にご相談ください。
- ▶ 常に乾燥させてご使用ください。


装着方法 (右手の場合)

- ▶ 本装具には左右があります。装着前に前後、左右、表裏を確認してください。
- ▶ 手部(第2~5指)を装具にしっかりと差し込みます。〔①〕
※母指の付け根に軽く触れる程度に差し込みます。
- ▶ 前腕部を回し、装着完了です。〔②〕

①

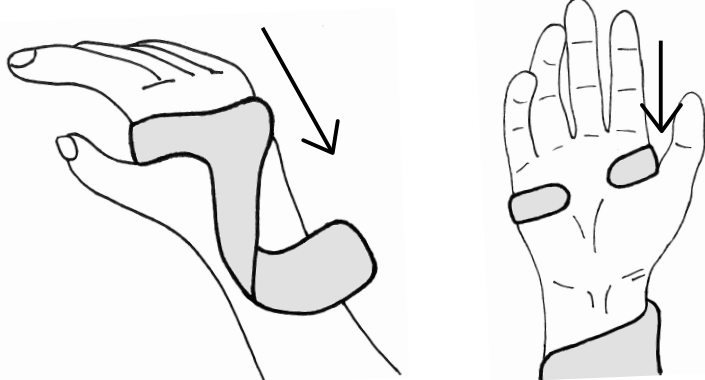

②

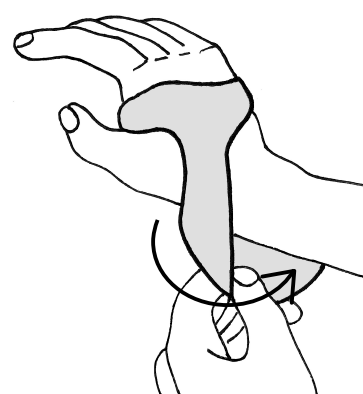

お手入れについて

- ▶ 水洗いし、タオル等で水気を拭き取ってください。
- ▶ 汚れがひどい場合は中性洗剤または消毒用アルコールをご使用ください。

義肢装具製作所様用

調整方法

- ▶ ヒートガン先の先にアタッチメントを取り付け、調整したい部分の両面を熱し(曲げる際の抵抗が残っている程度)、ゆっくりと力を加えてください。
※加熱のし過ぎは元の形状を損ないますのでご注意ください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3
世田谷ビジネススクエア ヒルズII 2F-25号
TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362