

H・A・S (Hip Abduction Splint) 601N 取扱説明書

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- ▶ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士など医療従事者が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- ▶ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- ▶ 本装具の使用により過度の圧迫による痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は、速やかに医師または義肢装具士にご相談ください。
- ▶ 使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに義肢装具士にご相談ください。
- ▶ 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止めください。


注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- ▶ 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- ▶ ベルトは緩まないように装着してください。
- ▶ 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- ▶ 常に乾燥させてご使用ください。
- ▶ 直射日光の当たる場所や、高湿になる場所に放置しないでください。


装着方法

- ▶ 股関節の外転角度に注意しながら装着者を本体に乗せ、ベルトを締めます。

本体構造と名称

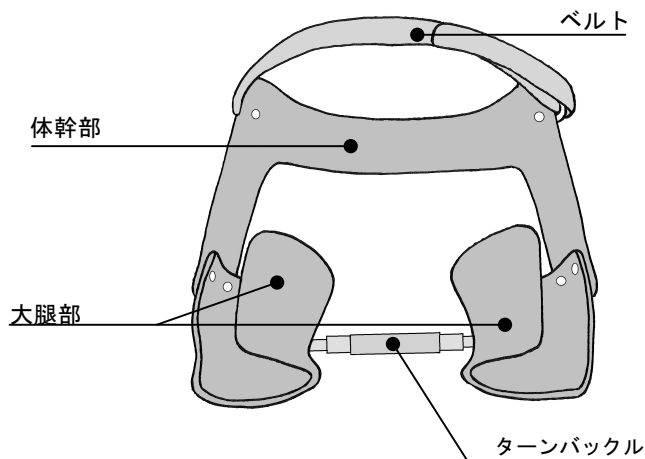

装着図

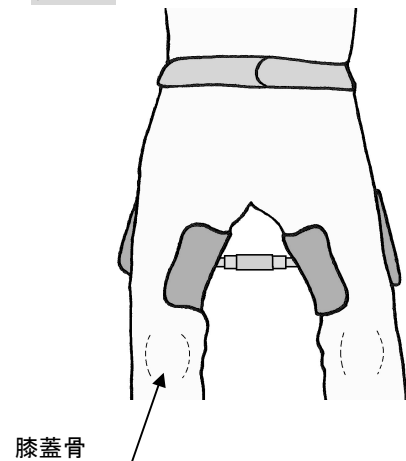

お手入れについて

- ▶ 常に清潔な状態でご使用ください。
- ▶ 本体は水洗いし、タオル等でしっかりと水気を拭き取ってください。
- ▶ 汚れがひどい場合は中性洗剤または消毒用アルコールをご使用ください。

義肢装具製作所様用

調整方法

- ▶ 症状に応じた股関節の外転角度になるよう、ターンバックルの長さを調整してください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元 世界遺産 石見銀山
中村ブレイス株式会社
本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3
世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号
TEL(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362