

## テニス肘用サポーター 509N 取扱説明書

(製品名：テニスパン)

### 警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- 本装具は医師の処方箋の基、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常や締め過ぎによる血行障害などが生じた場合は、速やかに医師にご相談ください。
- 長期間の使用及び使用状況によりマジックテープ部などが消耗劣化し、接着不良を起こした場合は、直ちに義肢装具士にご相談ください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

### 注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、マジックテープなどに異常がないか確認してください。
- **装着の際は、表裏を確認し装着してください。**
- マジックテープは緩まないようにとめてください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- マジックテープが衣類などにつかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。
- 常に乾燥させてご使用ください。
- 直射日光のあたる場所や高温になる場所に放置しないでください。

### 装着位置について

- 肘関節よりも少し先の外側で、手関節を反らせた際に緊張する筋を確認します。
- その部分にシリコンゴム製パッドをあて、ベルトを締めます。



### お手入れについて

- 中性洗剤で手洗いし、しっかりと水気を切り、陰干ししてください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社 / 〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132  
TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

2016 8

## テニス肘用サポーター 509N 取扱説明書

(製品名：テニスパン)

### 警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具は医師の処方箋の基、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常や締め過ぎによる血行障害などが生じた場合は、速やかに医師にご相談ください。
- 長期間の使用及び使用状況によりマジックテープ部などが消耗劣化し、接着不良を起こした場合は、直ちに義肢装具士にご相談ください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

### 注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、マジックテープなどに異常がないか確認してください。
- **装着の際は、表裏を確認し装着してください。**
- マジックテープは緩まないようにとめてください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- マジックテープが衣類などにつかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。
- 常に乾燥させてご使用ください。
- 直射日光のあたる場所や高温になる場所に放置しないでください。

### 装着位置について

- 肘関節よりも少し先の外側で、手関節を反らせた際に緊張する筋を確認します。
- その部分にシリコンゴム製パッドをあて、ベルトを締めます。

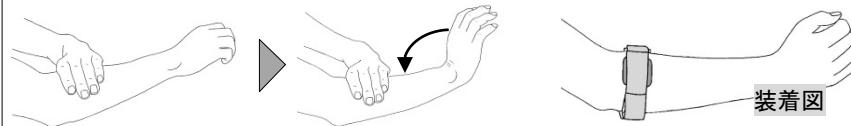

### お手入れについて

- 中性洗剤で手洗いし、しっかりと水気を切り、陰干ししてください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社 / 〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132  
TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

2016 8