

膝装具軟性

取扱説明書

(製品名：ラックニー「スポーツ」805N)

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談してください。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止してください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、前後、上下、左右、表裏を確認し装着してください。
- ベルトは緩まないように装着してください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- ストラップの使用方法については医師、または義肢装具士の指示に従ってください。
- 常に乾燥させてご使用ください。

装着方法 (右膝の場合)

- 本装具の上下、表裏を確認してください。左右のラベルが付いている方が上になります。
 - 本体を後方から膝に巻き、膝蓋骨(お皿)をしっかり出します。〔①〕
 - 膝の膝蓋骨のすぐ下、すぐ上、大腿部、下腿部の順に前のマジックテープを留めていきます。特に膝蓋骨のすぐ下のベルトはしっかりと締めてください。〔②〕
 - ストラップの使用方法については医師、または義肢装具士の指示に従ってください。
- 注) 誤った使用法は症状を悪化させる危険がありますので、十分にご注意ください。

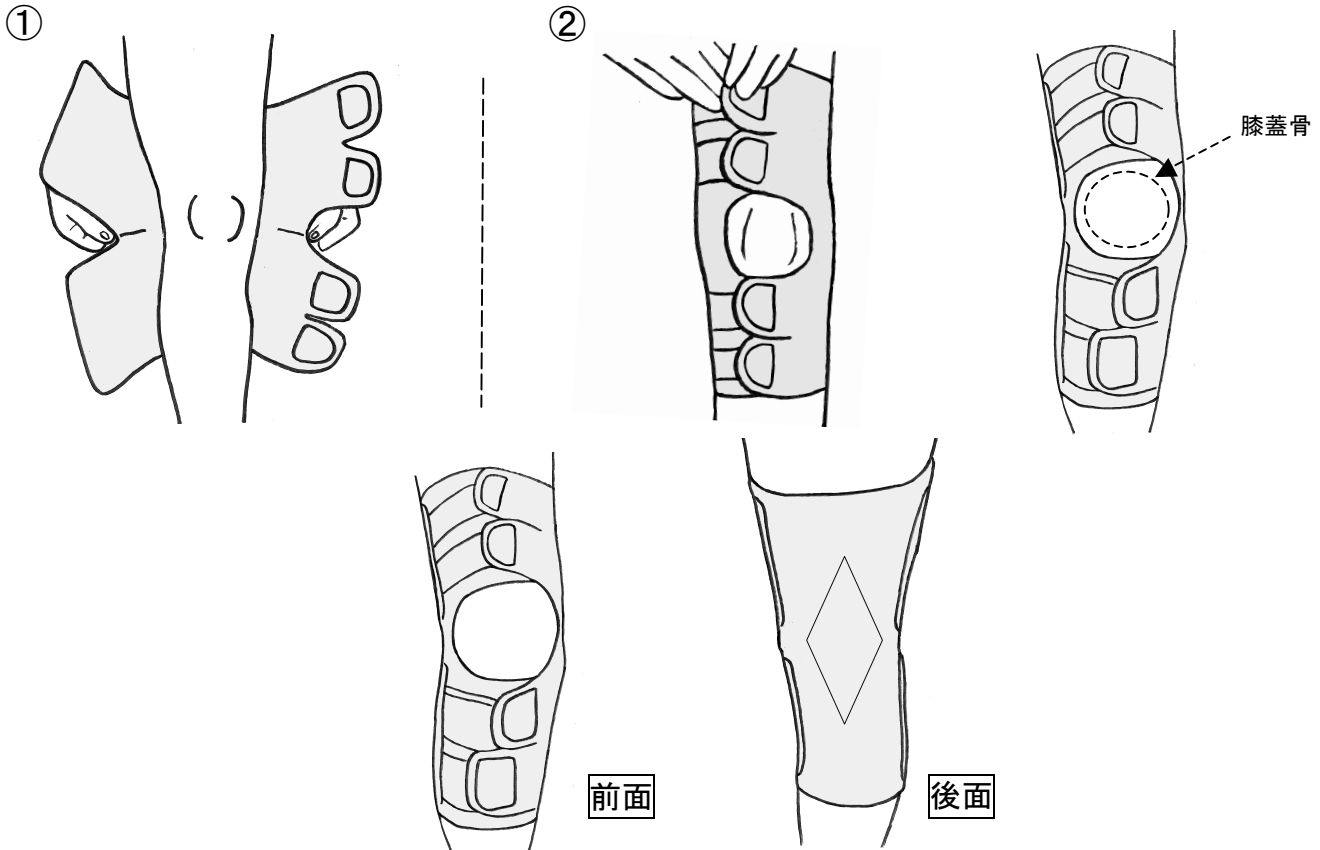


洗濯について

- 中性洗剤で手洗いし、よく水気を切り、陰干ししてください。
- 乾燥が不十分な場合、内部の金属が錆びて、衣服を汚染することがありますのでご注意ください。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないでください。


ストラップについて

- ストラップは3本あります。
- ストラップは症状に応じてご使用ください。
- 以下にストラップの使用例を示します。図は右膝の場合です。

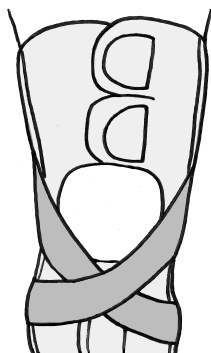


●前十字靭帯 (ACL) 損傷用

膝蓋骨の下でクロスさせ、下腿の前方引き出しを防ぎます。

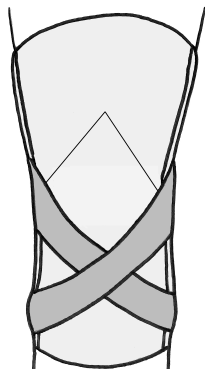


●後十字靭帯 (PCL) 損傷用

下腿後面上方でクロスさせ、下腿の後方引き出しを防ぎます。

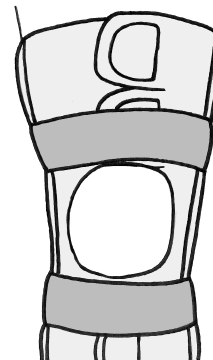


●膝蓋靭帯炎等用

膝蓋骨の上下を圧迫します。

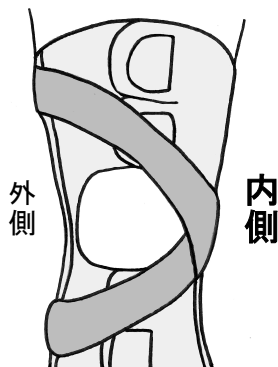

●内側側副靭帯 (MCL) 損傷用

膝関節内側でクロスさせ、外反動揺を防ぎます。

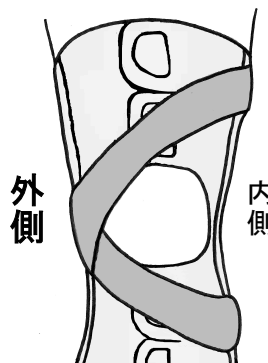

●外側側副靭帯 (LCL) 損傷用

膝関節外側でクロスさせ、内反動揺を防ぎます。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3

世田谷ビジネススクエア ヒルズII 2F-25号

TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362