

※本装具の使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
※本取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

■中村ブレイスの

アキレス腱断裂用 AFO 102N

を安全にご使用いただくために

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用下さい。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士にご相談下さい。
- 使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 本装具に全体重を掛けると金属支柱が破損することがあります。
装具には絶対に全体重を掛けないで下さい。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないで下さい。
- ご本人以外のご使用はお止め下さい。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、ベルト、支柱等に異常がないか確認して下さい。
- 装着の際は、左右を確認し装着して下さい。
- 3か所のマジックベルトが緩まないようにしっかりとめて下さい。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直して下さい。
- 直射日光のあたる場所、高温になる場所に放置しないで下さい。変形、破損等の原因になります。
- 常に乾燥させてご使用下さい。

義肢装具製作所様用

調整方法

- 補高の取り外しで底屈角度の調整が行えます。
- 下腿部後面で装具の高さ調整が行えます。

警告

- 本装具に全体重を掛けると金属支柱が破損することがあります。装具には絶対に、全体重を掛けないで下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山



中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

2013 11