

マス・マリヒップ 651N 取扱説明書

日本特許 No. 4006071
商標登録 No. 4280990

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談してください。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに義肢装具士にご相談ください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、マジック等に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、前後、上下、表裏を確認し装着してください。
- ベルトは緩まないように装着してください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- 肌着の上から装着してください。
- マジックベルトのオス(繊維の硬い方)にストッキングが触れると伝線する場合があります。
- 常に乾燥させてご使用ください。

装着方法

- 本体の前後、上下、表裏をご確認ください。[①]
※本体前面内側上に「上」の札が縫い付けてあります。
※シリコンコーティングのある方が内側になります。
- 本体を後ろから引っ張りながら前で上下のマジックをとめます。[②]
※シリコンコーティング部分の中央付近に大転子が位置するように設定してください。[③]
- 再度ベルトを締め直してください。

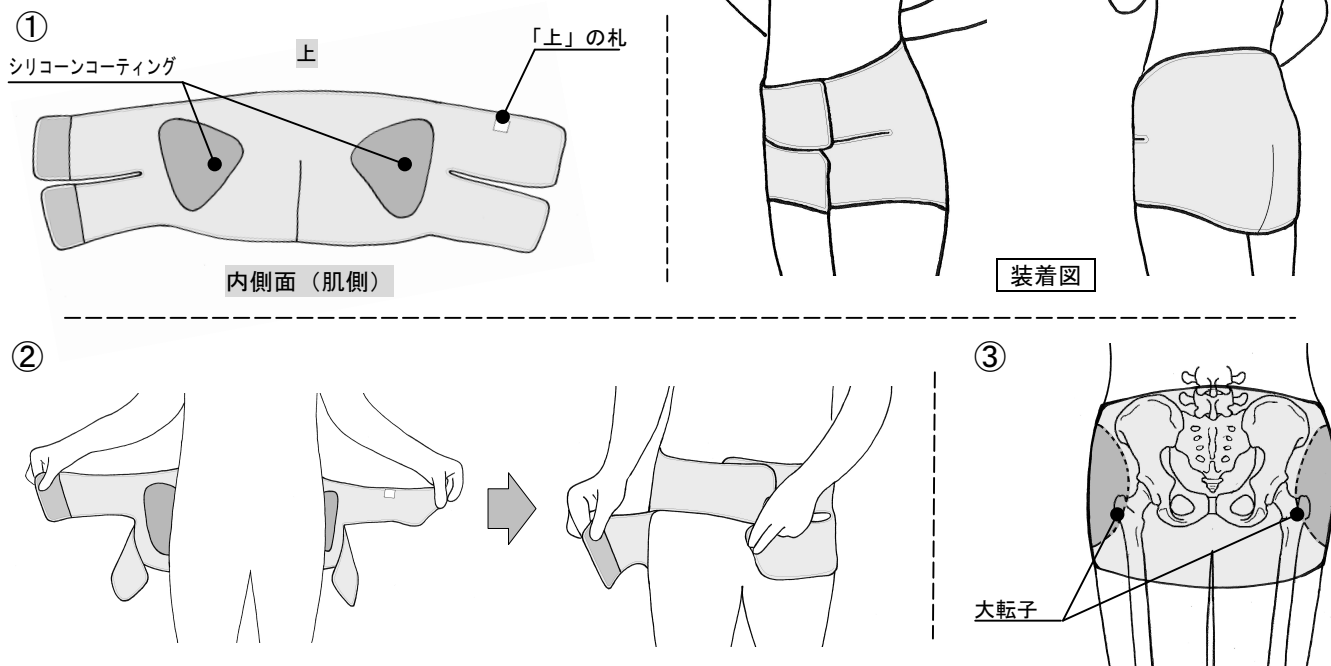

洗濯について

- 洗濯は中性洗剤で手洗いし、よく水気を切り、型を整えて陰干ししてください。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないでください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元 世界遺産 石見銀山
中村ブレイス株式会社
 本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
 TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018
 東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3
 世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号
 TEL(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362