


テクノバンド 708N 取扱説明書

特長

- テクノバンドは膝、肘、足首など様々な部位で、サポーターとしてご使用いただけます。
- 付属のUパッドの位置を変えることで、様々な症例に対応できます。

構造

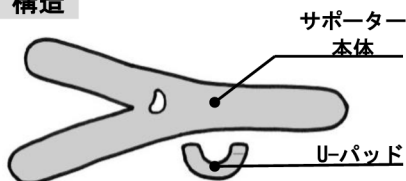


サイズ	S	M	L
膝関節の周径 (cm)	30~37	35~44	42~53


- 色：ベージュ
- 左右兼用

膝での使用例

- 膝蓋骨の
外側偏位防止に

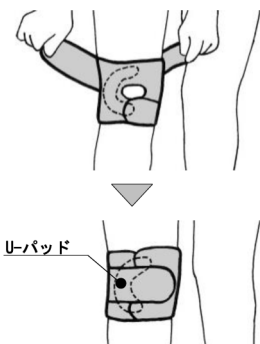


肘での使用例

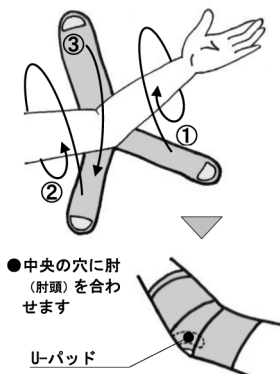

足関節での使用例

- 捻挫などの予防に

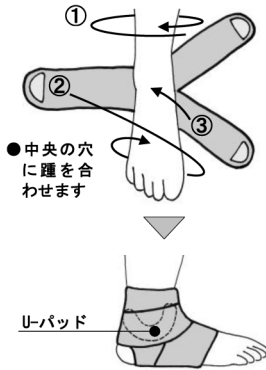

お手入れについて

- 洗濯は中性洗剤で手洗いし、よく水気を切り、型を整えて陰干しして下さい。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないで下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱店

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

■中村ブレイス株式会社

本 社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018 2013 11