

※本装具の使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読みください。

※本取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

■中村プレイスの

前距腓靭帯損傷用 AF0 103N

を安全にご使用いただくために

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士にご相談ください。
- 使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 本装具に全体重を掛けると金属支柱が破損することがあります。装具には絶対に全体重を掛けないでください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、ベルト、支柱等に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、左右を確認し装着してください。
- マジックベルトが緩まないようにしっかりととめてください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- 直射日光のあたる場所、高温になる場所に放置しないでください。変形、破損等の原因になります。
- 常に乾燥させてご使用ください。

調整方法

- ✦ 支柱の調整や足関節の角度制限の設定を症状に合わせて行ってください。
- ✦ 足関節の継手は3WAY ジョイントにより、90° 固定、背屈制限 20°、背屈フリーの3パターンで調整できます。
- ✦ 足関節の角度調整には付属の六角レンチをご使用ください。

警告

- ✦ 本装具に全体重を掛けると金属支柱が破損することがあります。装具には絶対に、全体重を掛けないでください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山



中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018 2013 11