

POアンクル 109N 取扱説明書

商標登録 No. 3224203

警告（この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります）


- ▶ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認しご使用いただく装具です。
- ▶ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用下さい。
- ▶ 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談し、指示に従って下さい。
- ▶ 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止して下さい。
- ▶ 本装具の加工、改造は絶対に行わないで下さい。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止め下さい。

注意（この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります）

- ▶ 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認して下さい。
- ▶ 装着の際は、上下、左右、表裏を確認し装着して下さい。
- ▶ ベルトは緩まないように装着して下さい。
- ▶ 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直して下さい。
- ▶ 強くベルトを締めた状態で長時間使用されますと、痛みや血行障害を生じる恐れがあります。
- ▶ 必ず靴下の上から装着して下さい。
- ▶ 常に乾燥させてご使用下さい。

装着方法（右足の場合）

- ▶ 本装具の上下、左右、表裏を確認して下さい。
- ▶ 全てのマジックベルトを外し、装具を広げます。2つのパッドはくるぶしに位置します。
- ▶ 本体後方の穴から踵を十分に出し（足関節90°）、アーチサポートを適切な位置に固定します。〔①〕
- ▶ 前当てを装具の内側にしわにならないように入れ、マジックベルトを1本ずつ締めていきます。
- ▶ 弾性ストラップは、まず足底部に回しアーチサポートをしっかりと固定させ、1周させます。〔②〕
- ▶ 次に内側上方へしっかりと引き上げます。〔③〕
- ▶ 次に外側のくるぶしから足底に回して固定します。〔④〕
- ▶ 外側のストラップが浮くので、3番目のマジックベルトを上から締め直し密着させて下さい。〔⑤〕

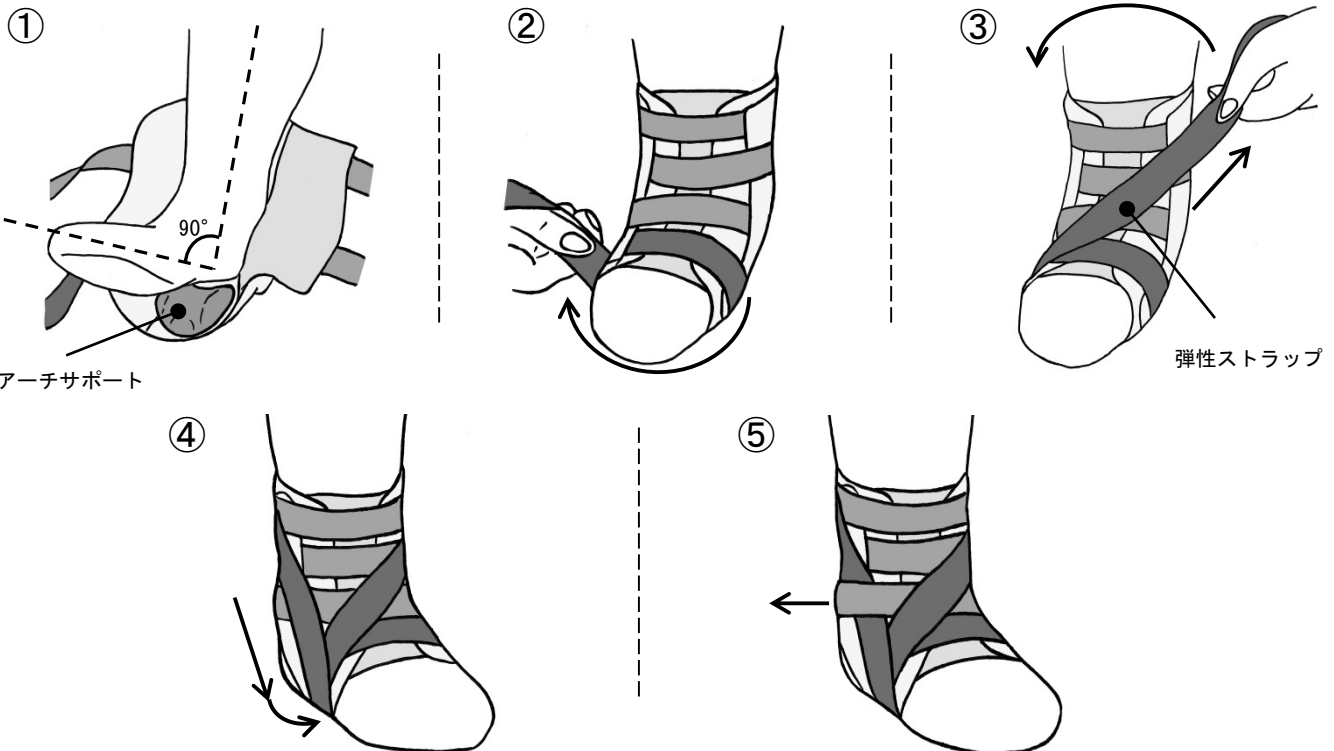

洗濯について


- ▶ シリコン製アーチサポートを取り外し中性洗剤で手洗いし、よく水気を切り陰干しして下さい。
- ▶ 乾燥が不十分な場合、内部の金属が錆びて、衣服を汚染させることがありますのでご注意ください。
- ▶ シリコン製アーチサポートは中性洗剤で手洗いし、タオル等でよく水気を拭き取って下さい。
- ▶ 漂白剤、乾燥機は使用しないで下さい。

調整方法

- マジックベルト、前当ては適切な長さにカットして下さい。
- アーチサポートを適切な位置に固定して下さい。
- 装着の際は、弾性ストラップが踵骨に当たらないように注意して下さい。

アーチサポートと弾性ストラップの効果について

- まず、アーチサポートと弾性ストラップで前足部を固定します。〔①〕
- 次に、弾性ストラップを②から③の方向に回すことで、足関節を外反位にさせ、さらに足部を後方に引き下げることで、距骨の前方へのすべりを防止します。

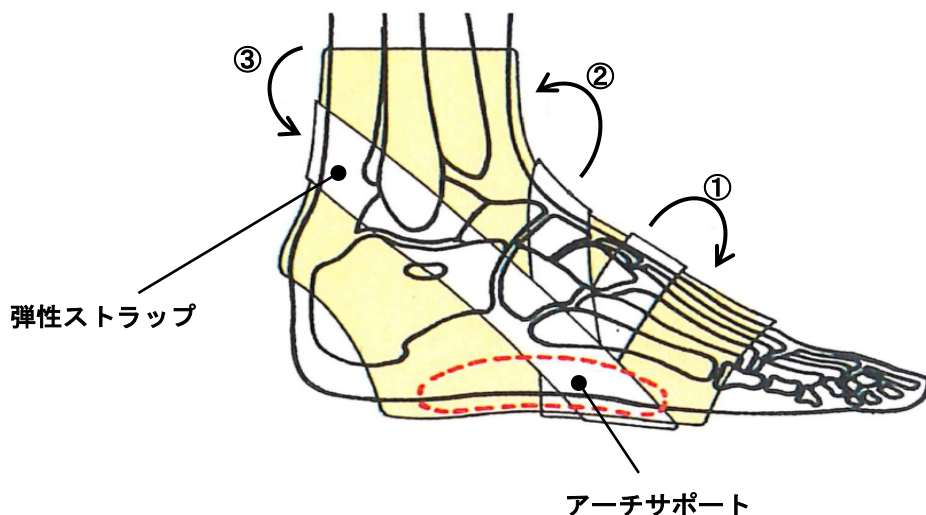

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231(代) FAX (0854) 89-0018

東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3

世田谷ビジネススクエア ヒルズII 2F-25号

TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362

2013.6