

# 肩外転装具軟性 955N 取扱説明書

(製品名：エアーバッグコンパクトプラス)

## 警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- ▶ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合し、ご使用いただく装具です。
- ▶ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、医療従事者の指導を受け、正しくご使用ください。
- ▶ 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談してください。
- ▶ マジックテープ部が外れると装着位置がずれ、非常に危険です。しっかりと貼り付けてください。
- ▶ 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止してください。
- ▶ 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止めください。


## 注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- ▶ 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- ▶ 装着の際は、前後、上下、左右を確認し装着してください。
- ▶ ベルトは絶対に緩まないように装着してください。
- ▶ 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- ▶ 常に乾燥させてご使用ください。
- ▶ 直射日光の当たる場所や、高湿になる場所に放置しないでください。

## 洗濯について

- ▶ 本体内部のエアー素材を取り出し、外側の生地のみを中性洗剤で手洗いしてください。
- ▶ よく水気を切り、陰干ししてください。脱水する際は洗濯用ネットをご使用ください。
- ▶ アイロン、漂白剤、乾燥機は使用しないでください。
- ▶ 洗濯後はエアー素材を必ず元と同じ位置に戻してください。

## 本体構造と名称 (右肩受傷の場合)

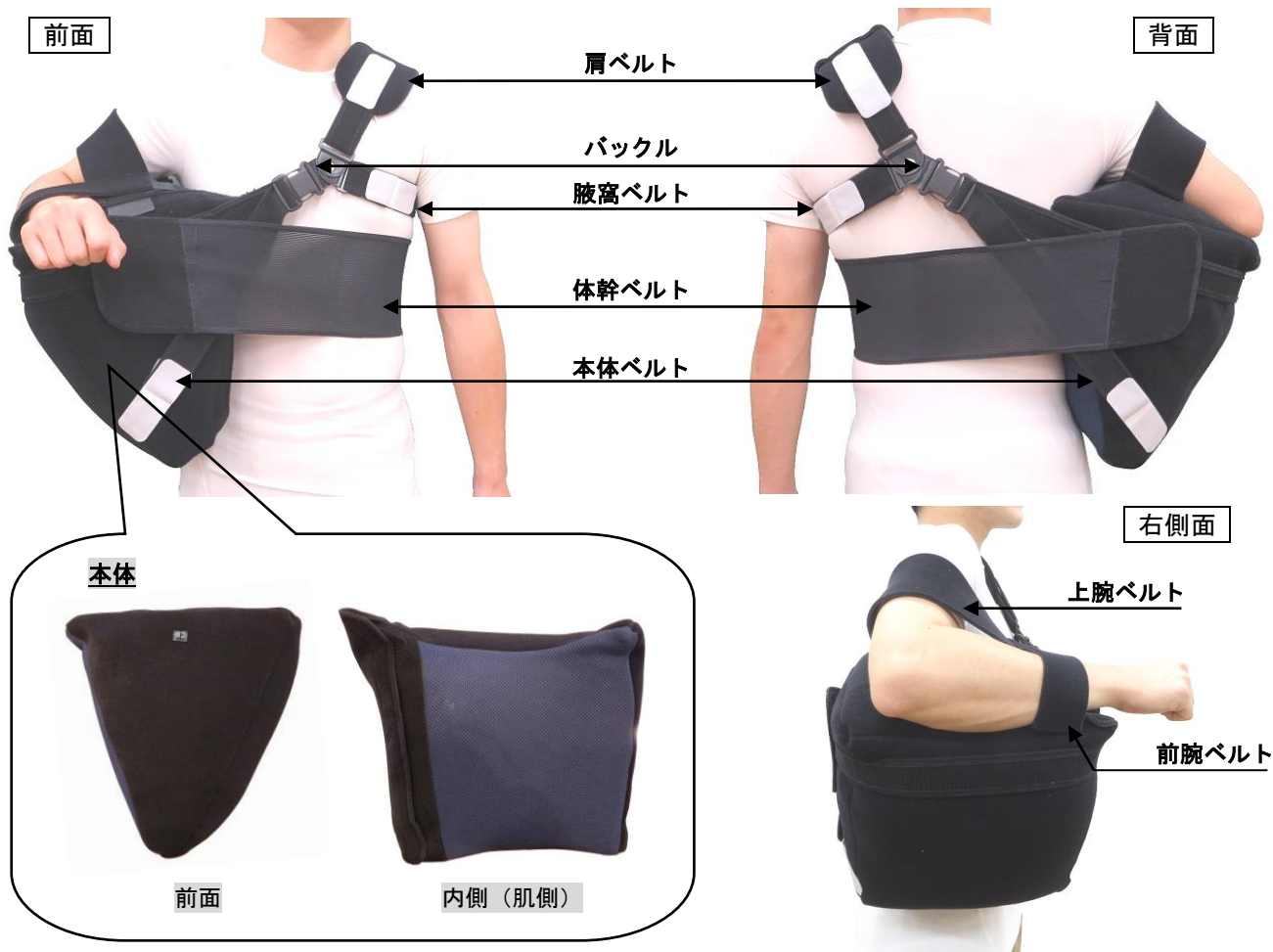

## 装着方法（右肩受傷の場合）

- ① 
- ・左肩に肩ベルトの幅の広い方が上になるように通します。
- ② 
- ・肩の外転角度に注意しながら本体を右側のわきの下に置きます。  
注）本体の上下を間違わないでください。  
青いメッシュ生地の面が肌側になります。
- ③ 
- ・前面で肩ベルトのバックル（受け）と本体ベルトのバックル（先）をはめます。
- ④ 
- ・本体ベルトに緩みがある場合は、前面のマジックを調整します。背面も同様に行います。
- ⑤ 
- ・上腕ベルト、前腕ベルトで上肢を固定します。
- ⑥ 
- ・最後に、体幹ベルトで本体をしっかり固定してください。

## 義肢装具製作所様用

### 調整方法

- 各ベルトが長い場合は先端のマジックテープを外し、適切な長さにカットしてください。  
※ベルトの切り過ぎには十分ご注意ください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

**中村ブレイス株式会社**

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

2021.4