

エアバッグコンパクト 953N 取扱説明書

警告（この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります）


- ▶ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合し、ご使用いただく装具です。
- ▶ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の指導を受け、正しくご使用ください。
- ▶ 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談してください。
- ▶ マジックテープ部が外れると装着位置がずれ、非常に危険です。しっかりと貼り付けてください。
- ▶ 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止してください。
- ▶ 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止めください。

注意（この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります）

- ▶ 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- ▶ 装着の際は、前後、上下、左右、表裏を確認し装着してください。
- ▶ ベルトは絶対に緩まないように装着してください。
- ▶ 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- ▶ 常に乾燥させてご使用ください。
- ▶ 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に放置しないでください。

装着方法（右肩受傷の場合）

- ▶ 本体底面中央にメインベルトの中心が位置するように取り付けます。〔①〕
- ▶ 背部を通るメインベルトを肩リングの坎に通して折り返し、本体の側面にとめます。〔②〕
- ▶ 健側（左肩）に肩リングをあて、ベルトを腋の下から回してとめます。〔③〕
※左肩受傷（健側右肩）の場合は肩リングの前後が逆になりますのでご注意ください。
- ▶ 肩の外転角度に注意しながら本体を患側の腋の下に置きます。〔④〕（メッシュ生地が身体に接します）
- ▶ 前面で本体底面から出るベルトを肩リングの坎に通して折り返し、本体の側面にとめます。〔⑤〕
- ▶ 上肢固定用ベルトで上腕、前腕を固定します。〔⑥〕
- ▶ 肩の外転角度は適切か、各ベルトが緩んでいないか等を確認し、装着完了です。
- ▶ 本体の回旋を防止したい場合は、付属の体幹ベルトで、本体をしっかりと体幹に固定してください。〔⑦〕

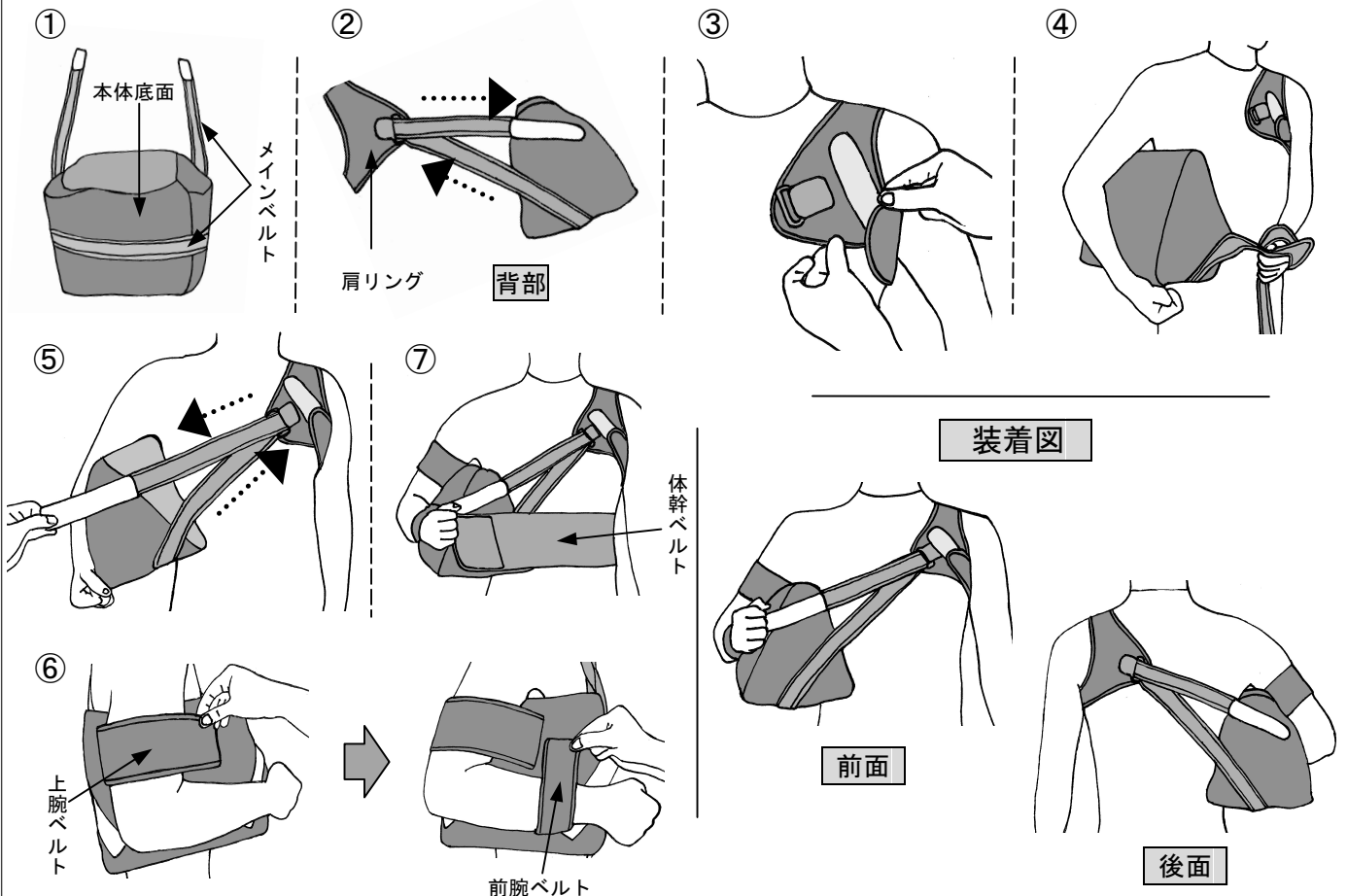


洗濯について

- ▶ 本体内部のエア素材を取り出し、外側の生地のみを中性洗剤で手洗いしてください。
- ▶ よく水気を切り、陰干しして下さい。脱水する際は洗濯用ネットをご使用ください。
- ▶ アイロン、漂白剤、乾燥機は使用しないでください。
- ▶ 洗濯後はエア素材を必ず元と同じ位置に戻してください。

義肢装具製作所様用

本体構造 と名称

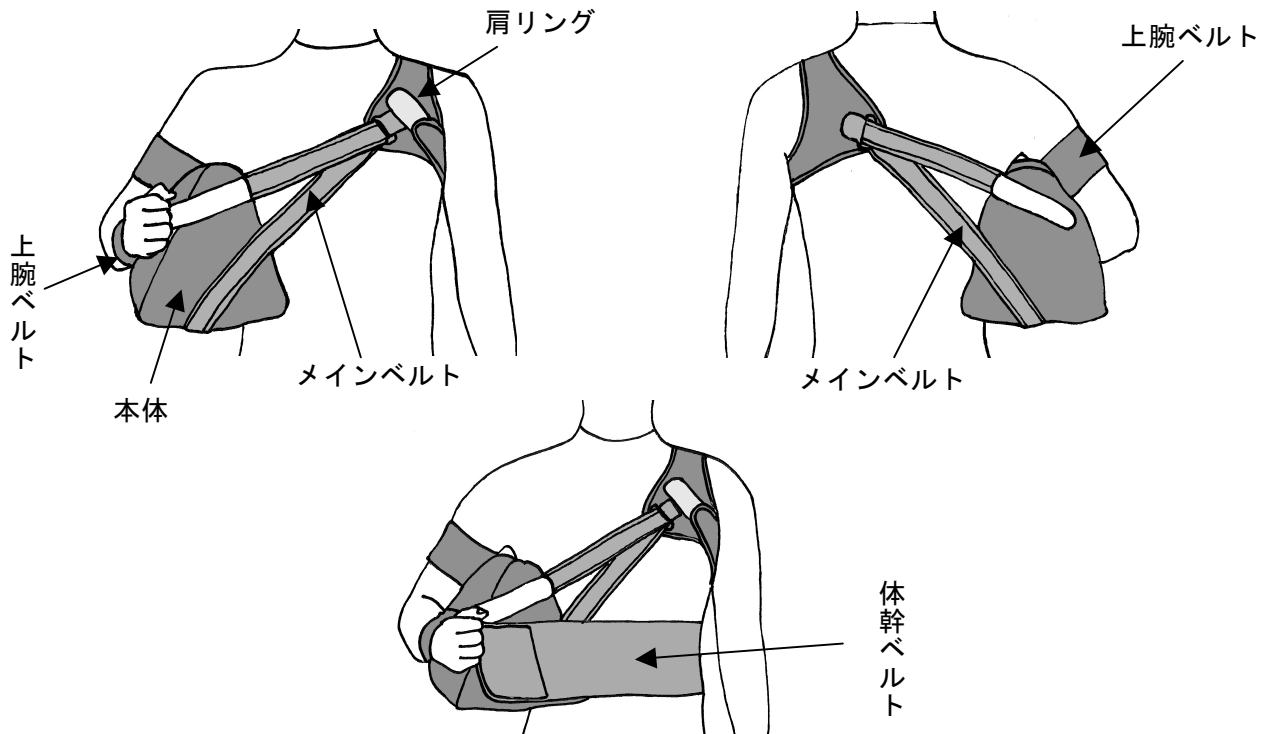

調整方法

- ▶ 本装具は左右兼用です。
- ▶ マジックテープ（白）が外れないように、本体にしっかりと貼り付けてください。
- ▶ メインベルトが長い場合は先端のマジックテープを外し、適切な長さにカットしてください。
※メインベルトの切り過ぎには十分ご注意ください。
- ▶ 本体の回旋を防止したい場合は、付属の体幹ベルトで、本体をしっかりと体幹に固定してください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3
世田谷ビジネススクエア ヒルズII 2F-25号
TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362

2013.10