

# 足関節装具軟性

# 取扱説明書

(製品名: アンクルファイター 107N)

## 警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談し、指示に従ってください。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止してください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

## 注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、上下、表裏を確認し装着してください。
- ベルトは緩まないように装着してください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- 強くベルトを締めた状態で長時間使用されますと、痛みや血行障害を生じる恐れがあります。
- 必ず靴下の上から装着してください。
- 常に乾燥させてご使用ください。


## 洗濯について

- 中性洗剤で手洗いしてください。
- よく水気を切り、陰干ししてください。
- 乾燥が不十分な場合、内部の金属が錆びて衣服を汚染させることがありますのでご注意ください。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないでください。


## 装着方法（右足の場合）

- 本装具の上下、表裏を確認してください。
  - 全てのマジックベルトを外し、装具を広げます。〔①〕
  - 足関節を直角（90°）に保ちながら足を置き、踵を穴の部分にしっかりと合せます。〔②〕
  - 前当てを装具の内側にしわにならないように入れます。〔③〕
  - 下から2番目のマジックベルトから1本ずつ締めていきます。〔④〕
  - 最後にもう一度、マジックベルトを下から順に締め直します。
- ※十分な固定力が得られない場合は、踵部分のフィットに注意してもう一度締め直してください。


①

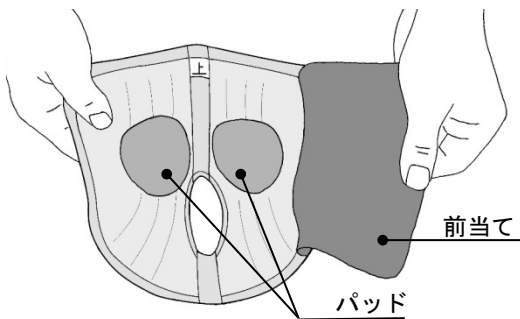


②

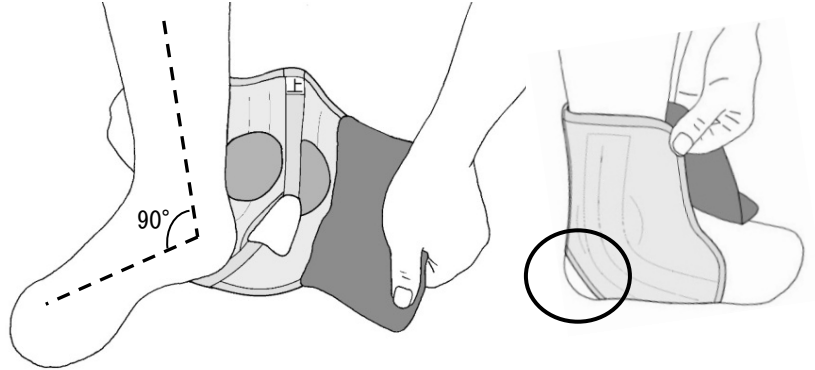

③

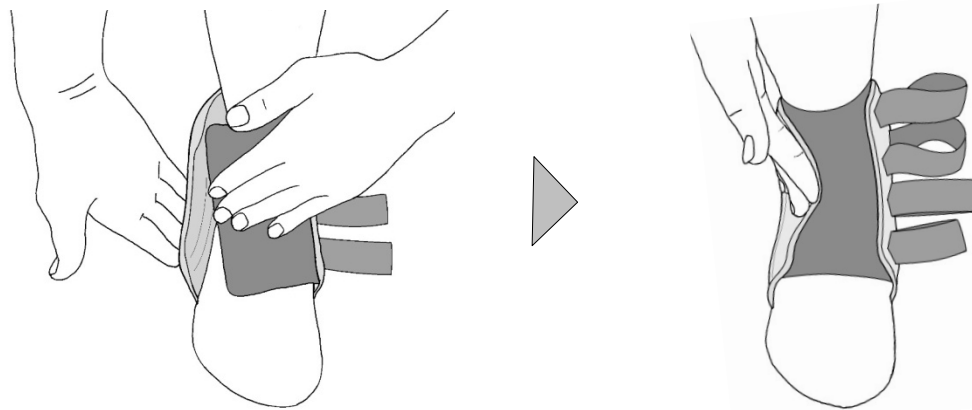

④

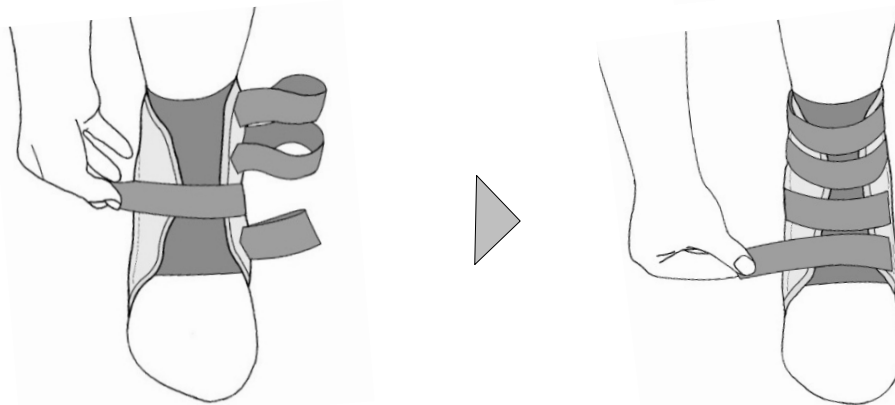

## 義肢装具製作所様用

### 調整方法

- マジックベルト、前当ては適切な長さにカットしてください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

**中村ブレイス株式会社**

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3

世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号

TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362