

パワフルリストZ 523N 取扱説明書

警告（この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります）


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により過度の圧迫による痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士にご相談ください。
- 使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 痛みや傷がある場合は使用しないでください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意（この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります）

- 装着前に必ず本体等に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、前後、左右、表裏を確認し装着してください。
- 装具の圧迫が気になる部分には、付属のパッド（粘着付）をご使用下さい。改善されない場合は医師または義肢装具士にご相談ください。
- 長期間使用する過程で形状が変わる可能性があります。フィット性や背屈角度の調整は、医師または義肢装具士にご相談ください。
- 常に乾燥させてご使用ください。

装着方法（右手の場合）

- 本装具には左右があります。装着前に前後、左右、表裏を確認してください。
- 手部（第2～5指）を装具にしっかりと差し込みます。〔①〕
※母指の付け根に軽く触れる程度に差し込みます。
- 手掌部の母指側中手骨バーを手掌のくぼみに合わせます。〔②〕
※小指側中手骨バーは母指側よりも上に位置します。
- 前腕部を回し、装着完了です。〔③〕

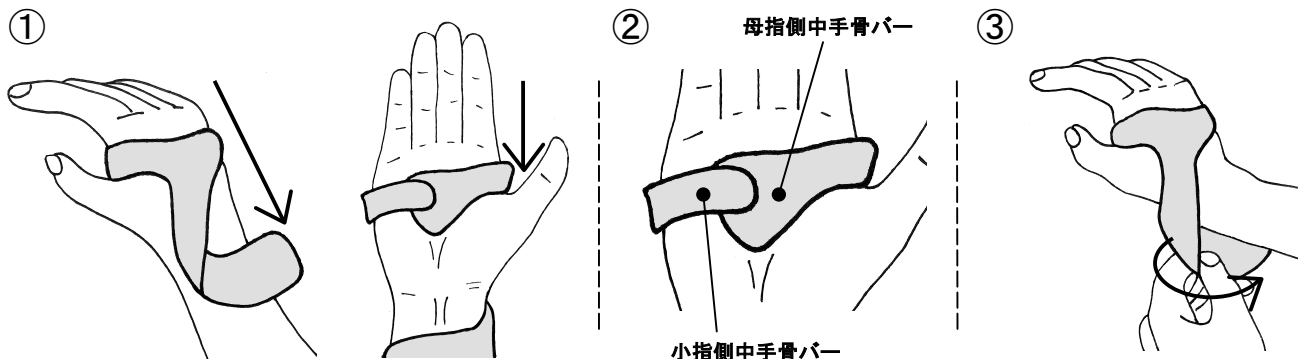

お手入れについて

- 水洗いし、タオル等で水気を拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤または消毒用アルコールをご使用ください。

義肢装具製作所様用

調整方法

- ヒートガンの先にアタッチメントを取り付け、調整したい部分の両面を熱し（曲げる際の抵抗が残っている程度）、ゆっくりと力を加えてください。
※加熱のし過ぎは元の形状を損ないますのでご注意ください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3

世田谷ビジネススクエア ヒルズII 2F-25号

TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362

2013.7