

※本装具の使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
本取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。


マレッター（ベルト付）501N 取扱説明書

使用上のご注意

- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用下さい。間違った使用はケガや事故の原因となります。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常やテープの締めすぎによる不具合が生じた場合は、至急医師に相談して下さい。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないで下さい。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直して下さい。
- 常に乾燥させてご使用下さい。

装着方法（中指損傷の場合）

- 中指の第1関節を過伸展させ、本体の凹面に第1関節の内側に置きます。〔①〕
 - 医療用テープなどで中指の第1関節と本体を巻き、しっかりと固定させます。〔②〕
 - 第2関節を屈曲位にし、ベルトを引き寄せテープで固定します。余分なベルトはカットして下さい。〔③〕
- 注）テープの締め過ぎには十分ご注意下さい。

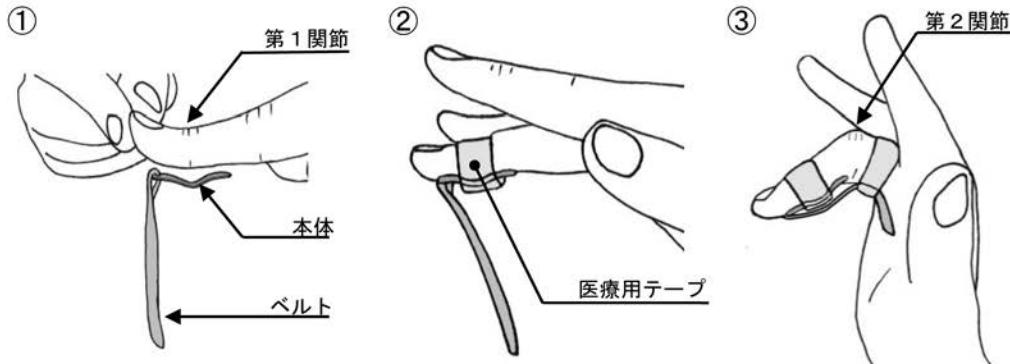

お手入れについて

- 本装具は直接お肌に装着するものです。常に清潔にしてご使用下さい。
- 中性洗剤で手洗いし、タオルなどでしっかりと水気を拭き取って下さい。
- ベルトは陰干しして下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社 〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018

東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀1-10-3

世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号

TEL(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362