

短下肢装具軟性

取扱説明書

(製品名:プロフッター)

商標登録 No. 1975282

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- ▶ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整し、ご使用いただく装具です。
- ▶ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。間違った使用はケガや事故の原因となります。
- ▶ 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談してください。
- ▶ 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止してください。
- ▶ 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- ▶ 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- ▶ 装着の際は、前後、上下、左右、表裏を確認し装着してください。
- ▶ ベルトは緩まないように装着してください。
- ▶ 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- ▶ 装着時の鼻緒の過度の圧迫により趾間部に痛みを生じる場合があります。痛みがある場合は使用をしばらく控えてください。
- ▶ マジックベルトのオス(繊維の硬い方)にストッキングが触れると伝線する場合があります。
- ▶ 常に乾燥させてご使用ください。

装着方法 (左足の場合)

- ① 麻痺足のつま先に本装具を通します。
- ② 鼻緒を母趾と示趾の間に通し、とめます。
- ③ 足首を 90° (直角)、もしくは背屈位にした状態で、ベルト部を背部から回し前足部に引き寄せながらとめます。注) 引き寄せる方向にご注意ください。

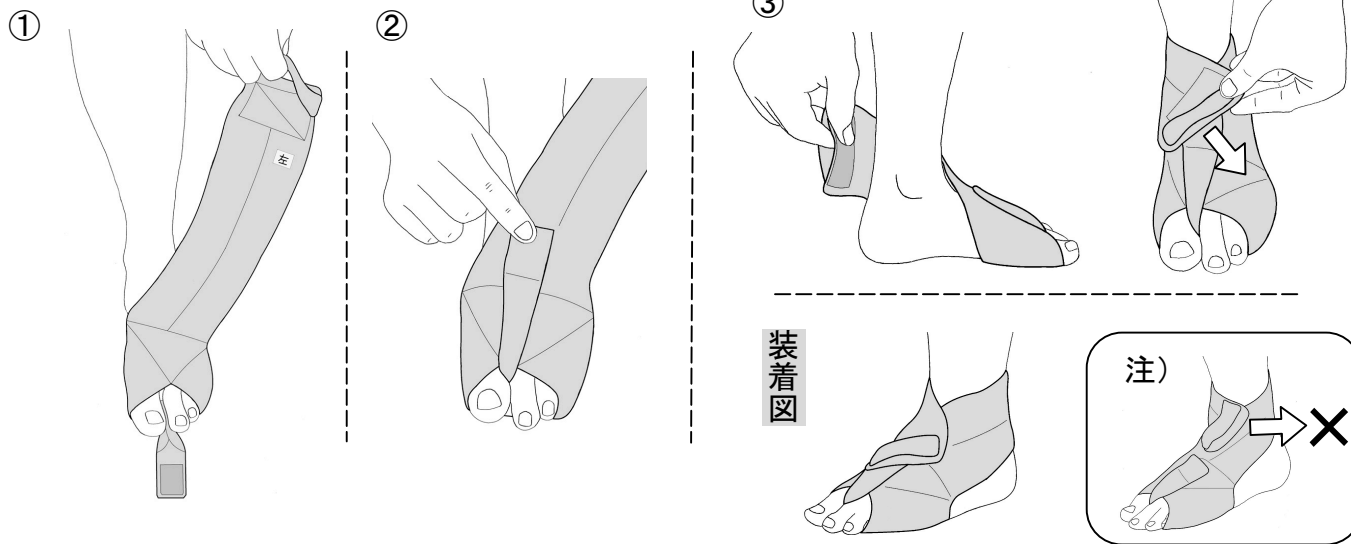

洗濯について

- ▶ 洗濯は中性洗剤で手洗いし、よく水気を切り、型を整えて陰干ししてください。
- ▶ 漂白剤、乾燥機は絶対に使用しないでください。
- ▶ 夏場など肌に直接装着した場合、蒸れなどが気になる場合は趾又のある靴下を装着するなどのご配慮をお願い致します。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元 世界遺産 石見銀山
中村ブレイス株式会社
本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀1-10-3
世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号
TEL(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362

2016.9