

シャンプス 605N 取扱説明書

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、医療従事者の指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または医療従事者に相談してください。
- マジックテープ部が外れると装着位置がずれ、非常に危険です。しっかりと貼り付けてください。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止し、医師または医療従事者に相談してください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- ベルトは絶対に緩まないように装着してください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- 常に乾燥させてご使用ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に放置しないでください。

装着方法

- 股関節の外転角度に注意しながら本体を股下に置きます。〔①〕
- 下肢固定ベルトを左右2本ずつ(大腿部、下腿部に1本ずつ)を前方に回し固定します。〔②〕
- 本装具は、装着した状態で体位変換を行えます。〔③〕

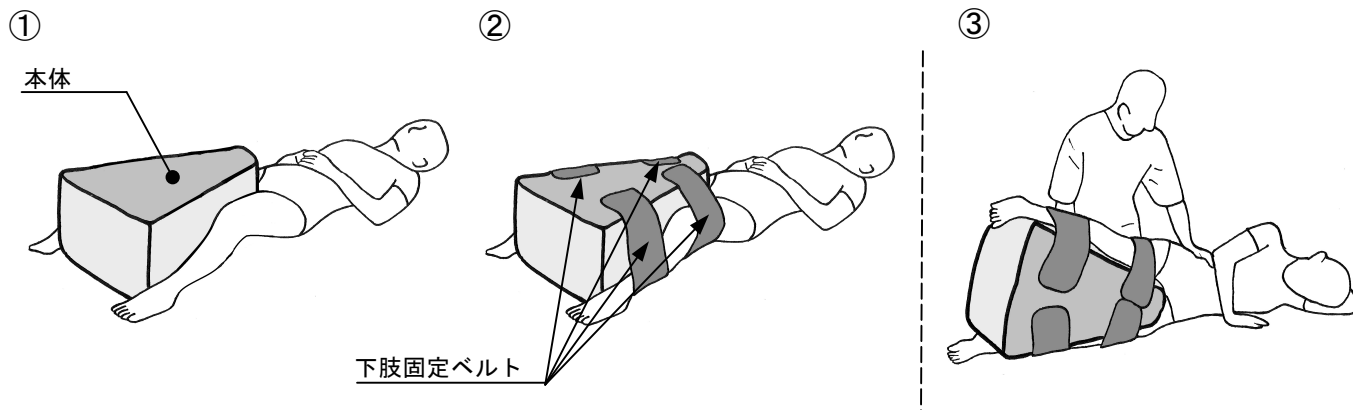

洗濯について

- 本体内部のエア素材を取り出し、外側の生地のみを中性洗剤で手洗いしてください。
- よく水気を切り、陰干しして下さい。脱水する際は洗濯用ネットをご使用ください。
- アイロン、漂白剤、乾燥機、ドライクリーニングは使用しないでください。
- 洗濯後はエア素材を元と同じ位置に必ず戻してください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元 世界遺産 石見銀山
中村ブレイス株式会社
本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3
世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号
TEL(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362
2013 11