

シリコーンゴム製手背屈装具 530N 取扱説明書

(製品名:カックアップシリコーン)

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- ▶ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- ▶ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- ▶ 本装具の使用により痛みやかぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士にご相談ください。
- ▶ 使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止し、義肢装具士にご相談ください。
- ▶ 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- ▶ 装着前に必ず手部、前腕部、ベルト等に異常がないか確認してください。
- ▶ 装着の際は、前後、左右、表裏を確認し装着してください。
- ▶ 手部はシリコーンゴム製です。無理に引っ張ったり、爪や指輪、刃物など鋭利なものがあたらないように注意してください。破損の原因となります。
- ▶ 常に乾燥させてご使用ください。

装着方法 (右手の場合)

- ▶ 手部を第2指から5指にしっかりと通します。〔①〕
- ▶ 前腕部を前腕に装着し、ベルトを締めます。〔②〕 注) 前後を間違わないでください。
- ▶ 手部のベルトを前腕部のカンに通します。〔③〕
- ▶ 通したベルトを、適切な背屈角度まで引っ張り、折り返してとめます。〔④〕

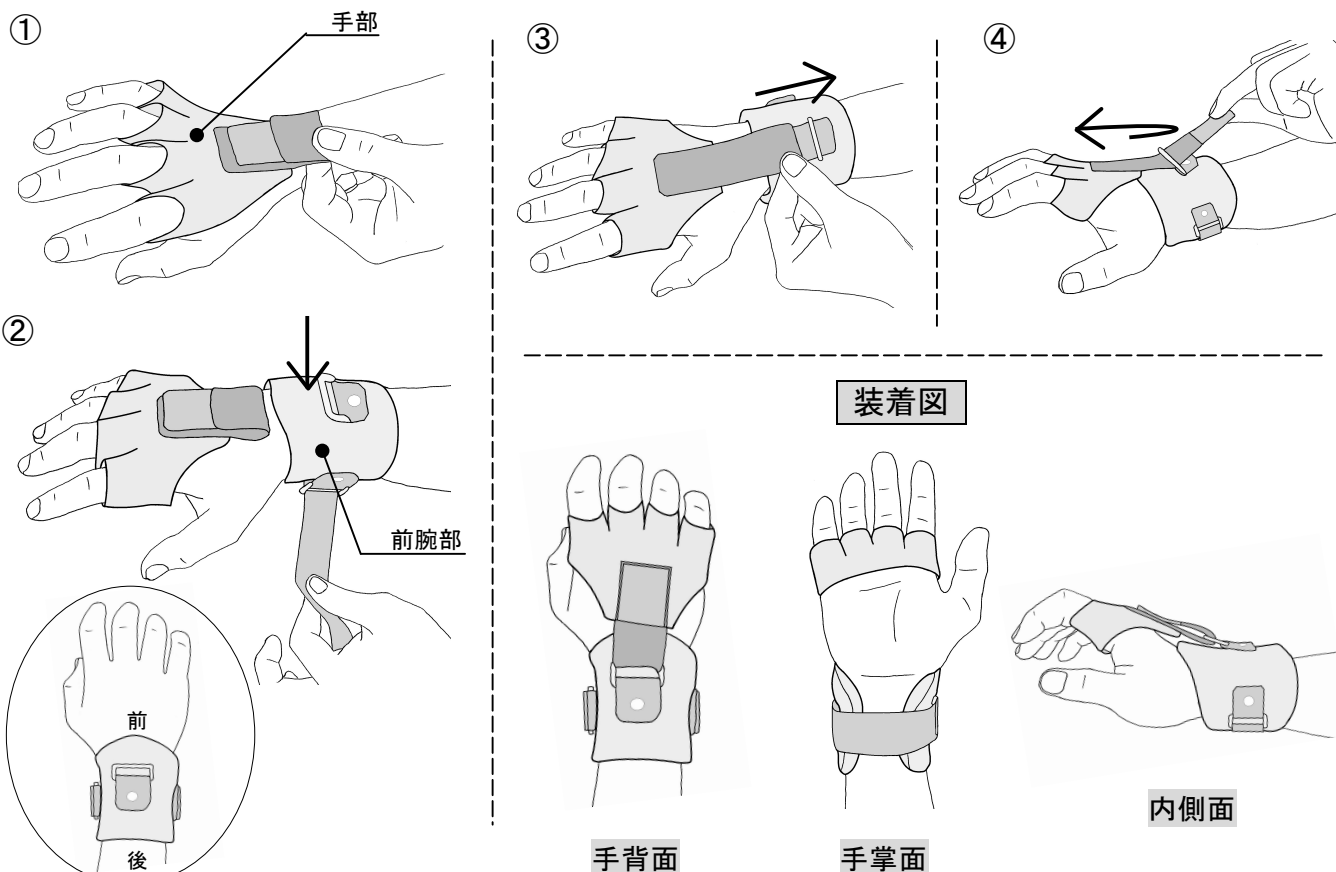

お手入れについて

- ▶ 本装具は直接肌に装着していただくものです。常に清潔にしてご使用ください。
- ▶ 手部は中性洗剤でなで洗いし、柔らかいタオルで水気を拭き取ってください。
- ▶ 前腕部は中性洗剤で手洗いし、よく水気を切り、完全に乾くまで陰干しをしてください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

2016.4