

外反母趾装具

取扱説明書

(製品名:アーチ付パワフルとんちゃん 204N)

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談し、指示に従ってください。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止してください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、上下、左右、表裏を確認し装着してください。
- ベルトは緩まないように装着してください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- 強くベルトを締めた状態で長時間使用されますと、痛みや血行障害を生じる恐れがあります。
- 常に乾燥させてご使用ください。

装着方法 (右足の場合)

- 本装具の上下、左右、表裏を確認してください。
- アーチサポートの位置に土踏まずを合わせます。〔①〕
- メタタルザルパッドが足裏の適切な位置に合うように中足骨ベルトを引っ張り、留めます。〔②〕
- 母趾ベルトを母趾と第2趾の間に通し、母趾を矯正するように引っ張り、留めます。〔③〕

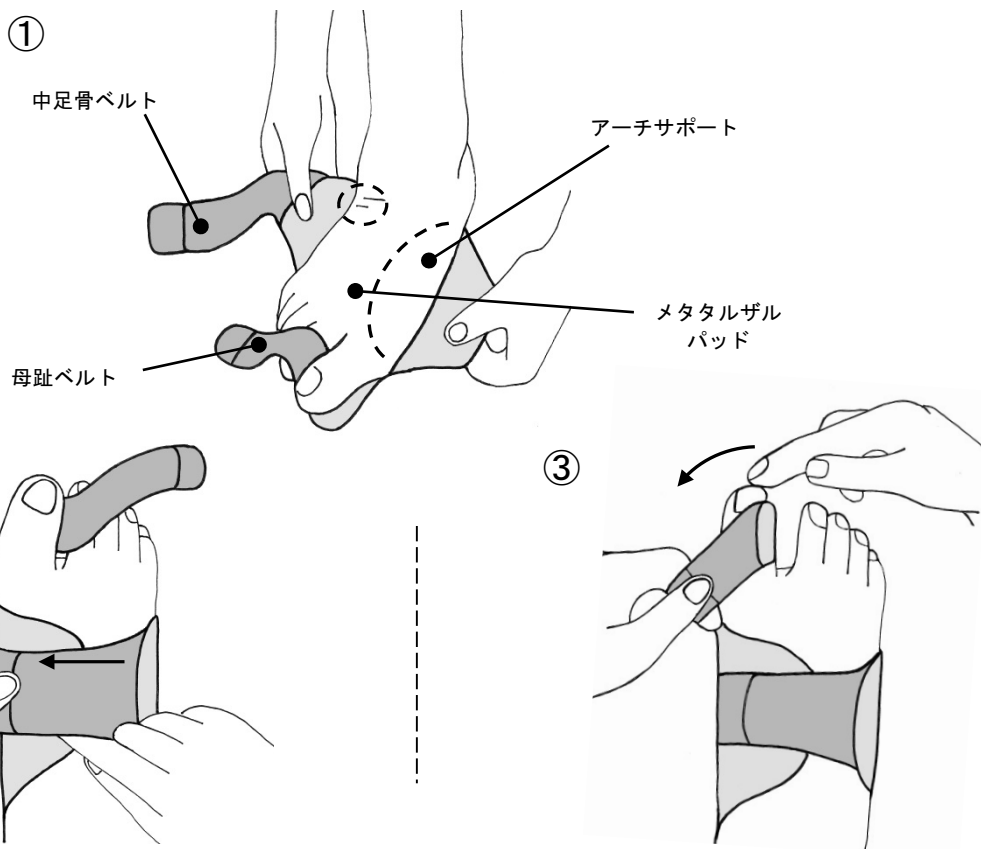


洗濯について

- 中性洗剤で手洗いし、型を整えて陰干ししてください。
- 夏場など肌に直接装着した場合、蒸れなどが気になる場合は趾又のある靴下を装着するなどのご配慮をお願い致します。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないでください。

調整方法

- メタタルザルパッドを横アーチに適合するように、適切な位置に付けてください。
- 2種類のアーチクッキー（大8mm、小5mm）を組み合わせることで、高さの調整が可能です。〔下図〕

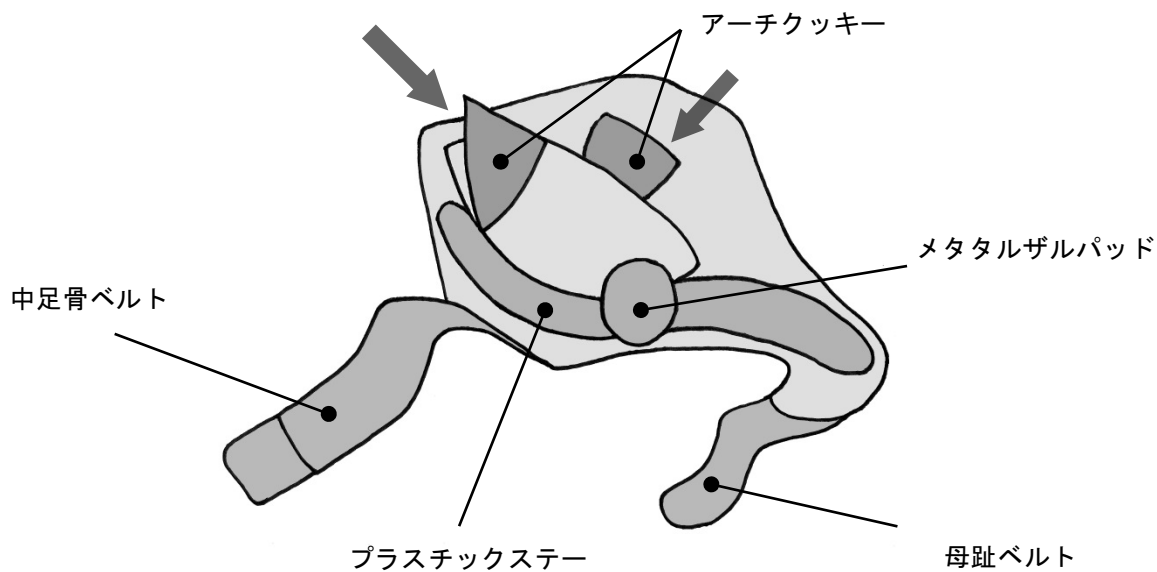

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3

世田谷ビジネススクエア ヒルズII 2F-25号

TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362

2015.2