

ジュエツトプレイバック 背当てスライド前締め式 取扱説明書

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談してください。
- 本装具は長期間の使用及び使用状況により破損する恐れがあります。万一、破損した場合はすぐに医師または義肢装具士にご相談ください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)


- 装着前には必ず装具に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、前後、上下を確認し、装着してください。
- ベルトは絶対に緩まないように装着してください。絶対に緩んだ状態で使用しないでください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- 常に乾燥させてご使用ください。汗などの水分が付着したまま使用されますと破損の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や、高湿になる場所に放置しないでください。

本体構造と各部の名称

- 胸骨パッド、恥骨パッド、背当てによる3点固定です。
- 両側面で、背当ての4つのカンにそれぞれベルトを通し、前方へ引張る前締め式です。

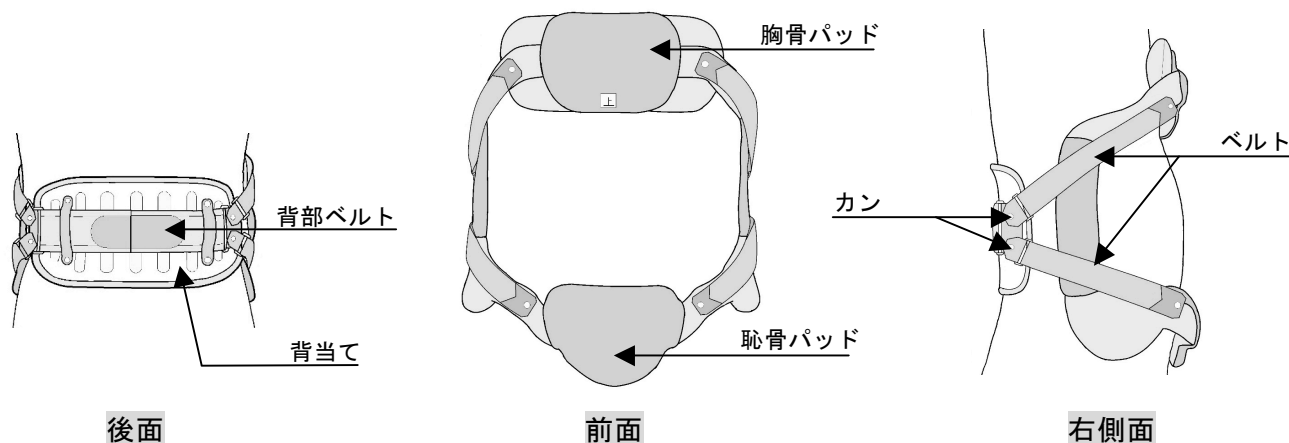

装着図

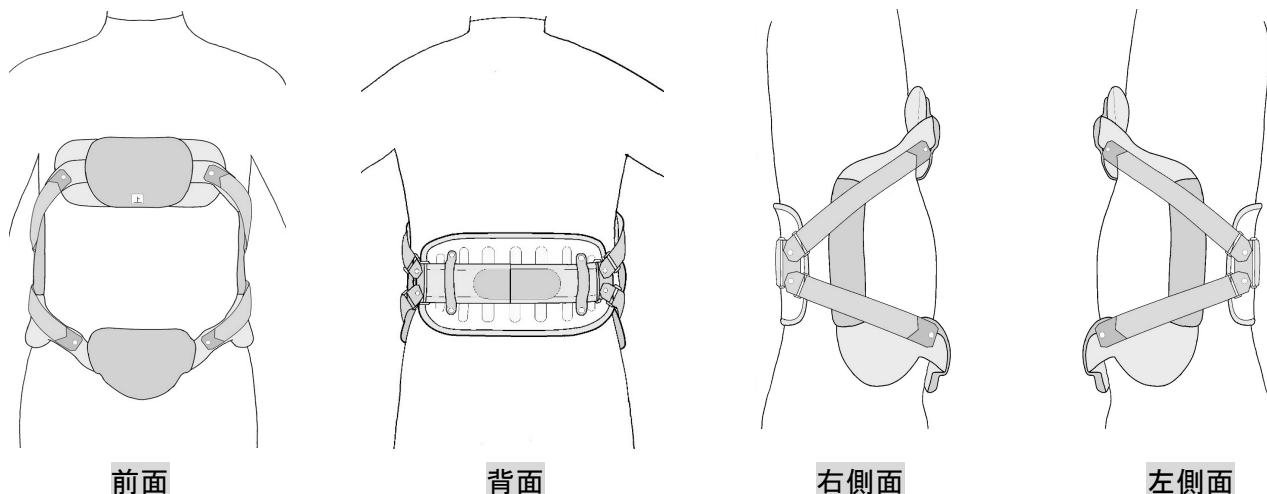

装着方法

- 装着前に本装具の上下を確認してください。※胸骨パッドに「上」と印があります。
- 本装具のどちらか一方の上下のベルトを外し、広げます。〔①〕
- もう一方の側面を身体の前に回します。〔②〕
- 背部ベルトのカンに2本のベルトをそれぞれ通し、仮止めします。〔③〕
※上下のベルトを間違わないように通してください。
- 身体を中心に「胸骨パッド」と「恥骨パッド」の中心が位置するように回します。〔④〕
※こし骨を結ぶ線上に「恥骨パッド」が位置します。〔⑤〕
- 身体背面の中心と背当ての中心が位置するようにスライドさせます。〔⑥〕
- カンに通した2本のベルトを前方に引っ張り、締めます。〔⑦〕
- 最後に両側面の上下のベルトを均等に引っ張り、緩みのないようにしっかりと締めます。〔⑧〕

