

アンクルエイト 108N 取扱説明書

商標登録 No. 4370985

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用下さい。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談し、指示に従って下さい。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないで下さい。
- ご本人以外のご使用はお止め下さい。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認して下さい。
- 装着の際は、上下、左右、表裏を確認し装着して下さい。
- ベルトは緩まないように装着して下さい。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直して下さい。
- 強くベルトを締めた状態で長時間使用されますと、痛みや血行障害を生じる恐れがあります。
- 必ず靴下の上から装着して下さい。
- 常に乾燥させてご使用下さい。

装着方法 (右足の場合)

- 本装具の上下、左右、表裏を確認して下さい。
 - 足底部のシリコンドットコーティングに足を載せ、甲側でマジックベルトを留めて下さい。〔①〕
 - 足関節を直角(90°)に保ち、足首ベルトを後方より回し留めます。〔②〕
 - 外側引き上げベルトを強く引き上げ、ベルトを内側から後方に回します。〔③〕
- ※十分な固定力が得られない場合は、もう一度ベルトを締め直して下さい。

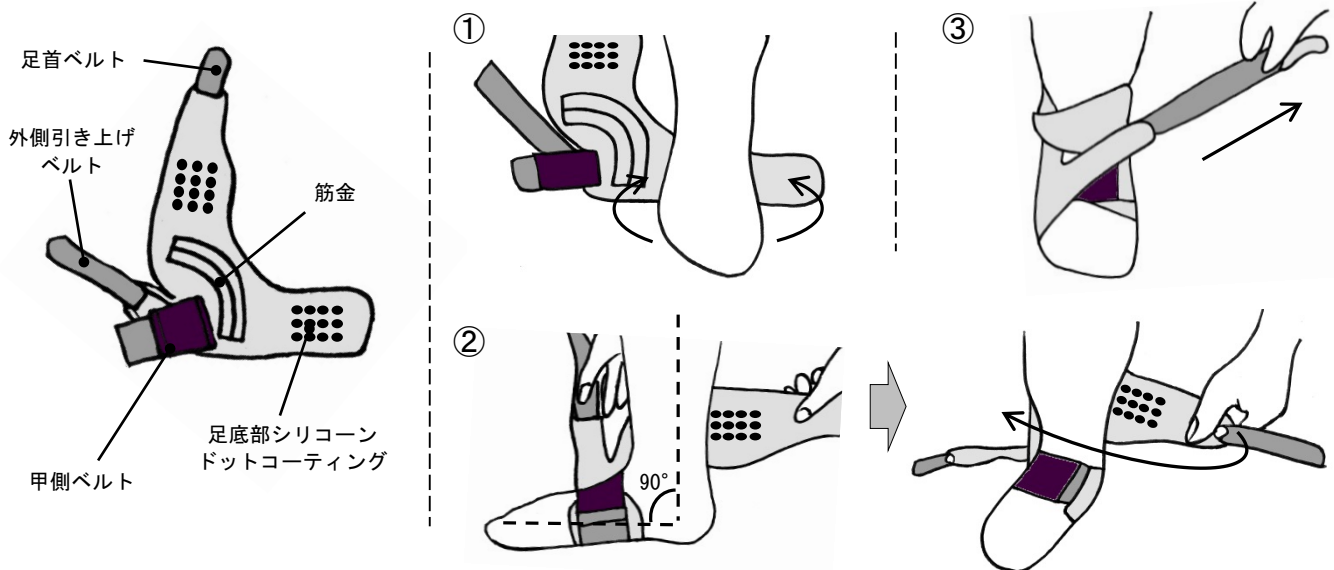

洗濯について

- 中性洗剤で手洗いして下さい。
- よく水気を切り、陰干して下さい。
- 乾燥が不十分な場合、内部の金属が錆びて衣服を汚染させることがありますのでご注意下さい。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないで下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3
世田谷ビジネススクエア ヒルズII 2F-25号
TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362

2013.6