

※本製品の使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読みください。本取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

頸椎装具軟性 971N 取扱説明書

(製品名：C ジャックカラー)

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- 本装具は医師の処方に基づき、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常や締め過ぎによる呼吸困難などが生じた場合は、速やかに医師にご相談ください。
- 長期間の使用及び使用状況によりマジックテープ部などが消耗劣化し、接着不良を起こした場合は、直ちに義肢装具士にご相談ください
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)


- 装着前に必ず本体、マジックテープなどに異常がないか確認してください。
- 装着の際は、前後、上下、表裏を確認し装着してください。
- マジックテープは緩まないようにとめてください。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- マジックテープが衣類などにつかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。
- 常に乾燥させてご使用ください。
- 直射日光のあたる場所や高温になる場所に放置しないでください。

お手入れについて



- 中性洗剤で手洗いし、しっかりと水気を切り、陰干ししてください。
- 汚れ防止、皮膚刺激防止などには薄いガーゼハンカチの様なもの、メリヤス生地などを首のあたる部分の内側に置いてから装着してください。

装着方法

- 装着前に本装具を広げ、「前後」、「上下」、「表裏」を確認してください。〔①〕
注) ファスナーが付いている方が「外側」です。
本体中心に顎をのせます。〔②〕 注) 本体中心のへこみのある方が「上」になります。
- 本体の両端を後ろに回し、マジックテープを合わせしっかりと止めます。〔③〕

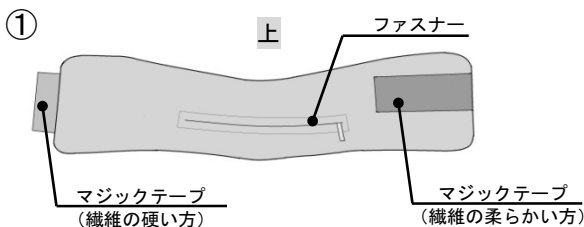

展開図 (外側)

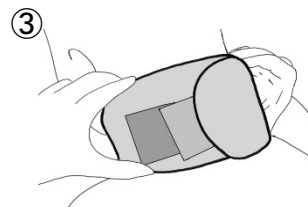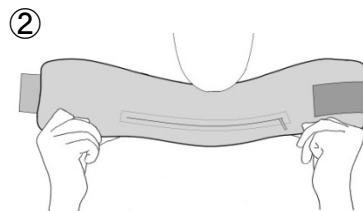

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社 / 〒694-0305 鳥根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

2016 12