

# 頭部保護帽 911N 取扱説明書


(製品名：トップヘッド)

## ご使用にあたっての注意事項

- ▶ 本製品は装着者の安全を保障するものではありません。使用者の障害レベル、体格、使用環境などを十分考慮し、安全上問題がないことを第三者が評価した上でご使用ください。
- ▶ 使用の可否の判断がつかない場合は、医師または理学療法士に相談してください。
- ▶ 本製品の使用によりかぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師に相談してください。
- ▶ 使用期間及び使用状況により製品に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ▶ 装着前に必ず本体、ベルトなどに異常がないか確認してください。
- ▶ 本製品の加工、改造は絶対に行わないでください。やむを得ず改造する場合は、購入先に依頼し、安全性を十分に考慮した改造を行ってください。
- ▶ 寒さにより、内部の低反発素材が硬くなります。
- ▶ 本製品は完全に乾燥した状態で使用、保管してください。
- ▶ 変形の恐れがありますので直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しないでください。
- ▶ 外力などにより変形の可能性があります。保管する際はご注意ください。
- ▶ ご本人以外のご使用はお止めください。

## 装着方法

- ▶ 装着前に本製品の前後を確認してください。
  - ▶ 本製品を頭にかぶり、あごベルトを耳ベルトに通し、とめます。
- 注) あごベルトのマジックが耳ベルトにあたると生地が傷みますのでご注意ください。

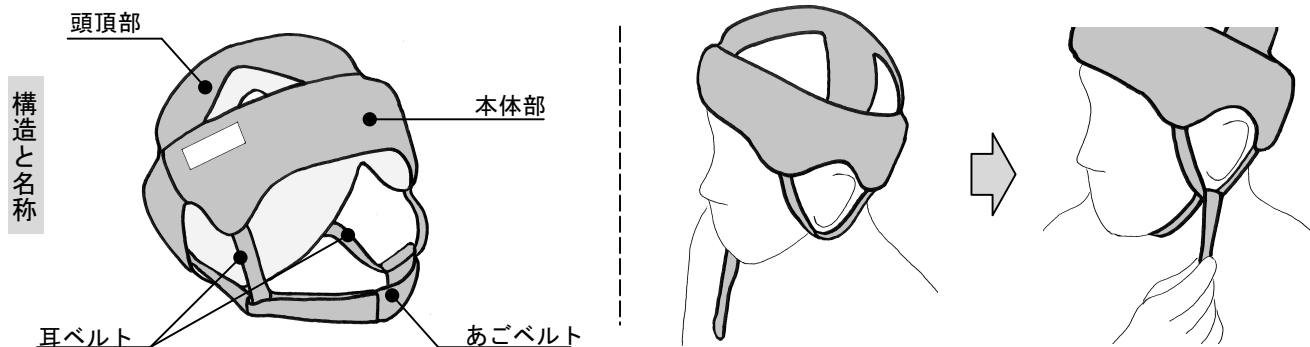


## 洗濯について

- ▶ 本製品は洗濯機で丸洗いができます。その際は、洗濯ネットをご使用ください。
- ▶ 洗剤は一般的な合成洗剤を使用してください。
- ▶ 洗濯後は形を整えて、陰干しをしてください。
- ▶ 乾燥機は生地や内部素材の縮みなど劣化の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

## 取扱店様用

### 調整方法

- ▶ 片方カシメ止めのあごベルトを取り付ける際は、まず先端を内側に折り込んでください。(右図)
- ▶ 穴は千枚通しなど先の細いもので開け、ハンマーを使いカシメを止めてください。
- ▶ 使用者がベルトの接触感を嫌がる場合や肌が弱い場合は、ベルトや必要箇所へ適切な処置を施してください。

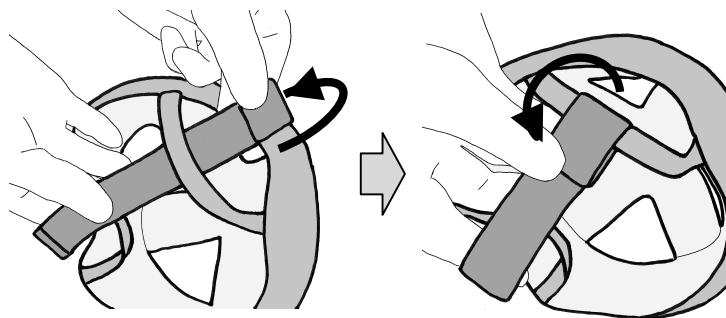

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱店

製造・発売元 世界遺産 石見銀山  
**中村ブレイス株式会社**  
本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132  
TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018  
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3  
世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号  
TEL(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362