

手関節装具軟性 (製品名:NB リスト) 取扱説明書

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用ください。
- 本装具の使用により過度の圧迫による痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または弊社担当者にご相談ください。
- 使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)


- 装着前に必ず本体等に異常がないか確認してください。
- 装着の際は、前後、左右、表裏を確認し装着してください。
- 常に乾燥させてご使用ください。
- 本装具の廃棄につきましては、各自治体の指示に従ってください。

構造と名称 (左手用)

内側面 (肌側)

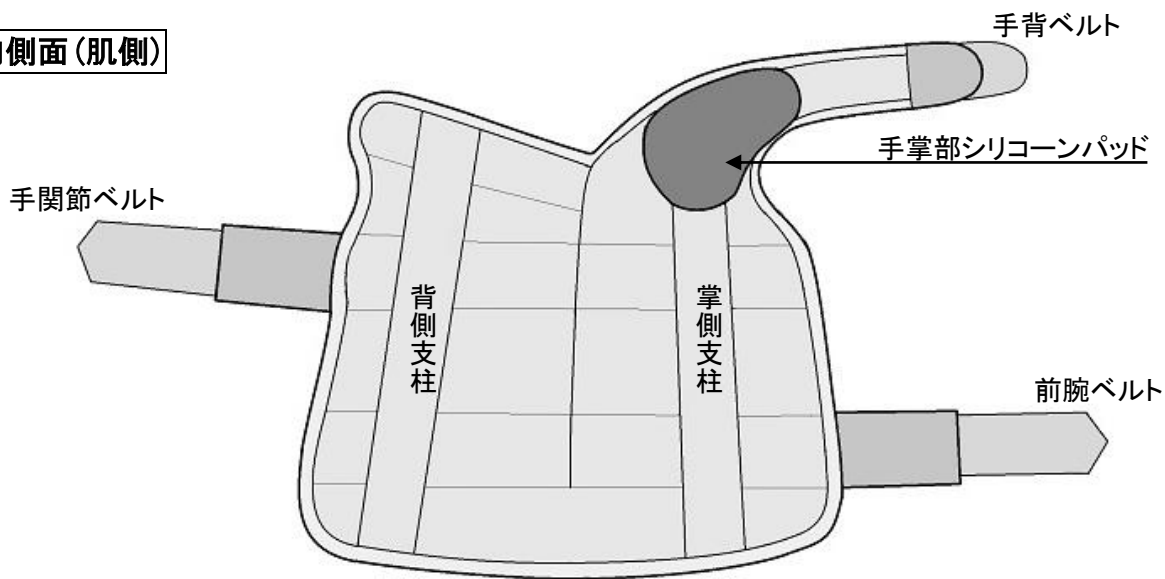


外側面

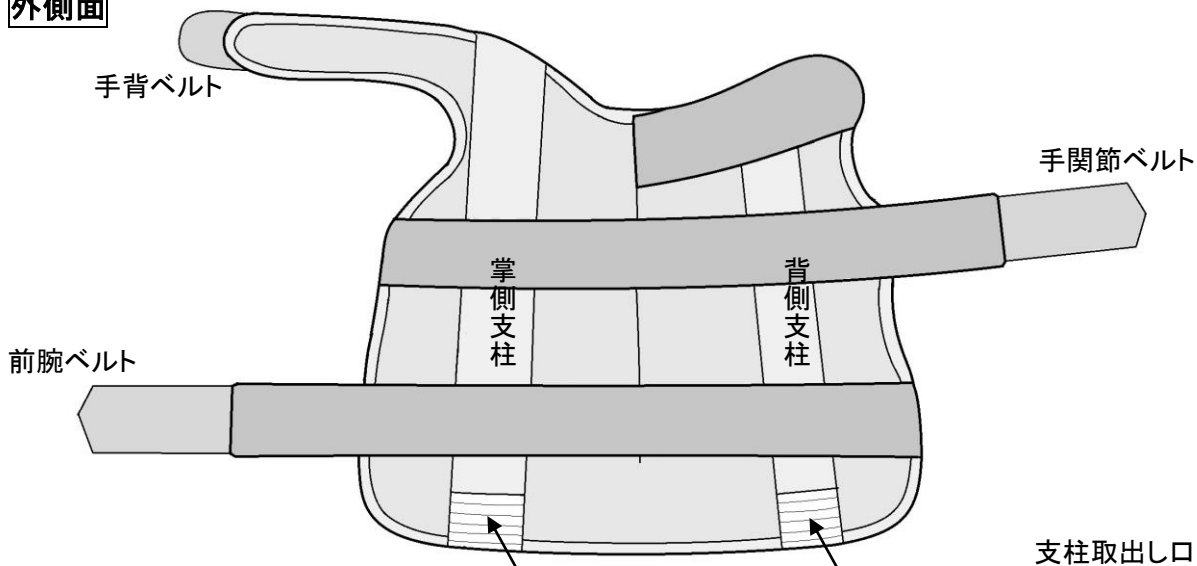


装着方法（左手の場合）

- 本装具には左右があります。装着前に前後、左右、表裏を確認してください。
- 手掌部シリコンパッドを手のひらのくぼみに合わせます。〔①〕
- 手関節ベルト、前腕ベルトを軽くとめます。〔②〕
- 手背側支柱、手掌側支柱が前腕の中心を通るように位置させ、手関節ベルト、前腕ベルトの順にベルトを引張りとめます。〔③〕
- 最後に手背ベルトをとめます。〔④〕
- 再度全てのベルトを締め直し、手関節がしっかりと固定されていることを確認し、装着完了です。


①

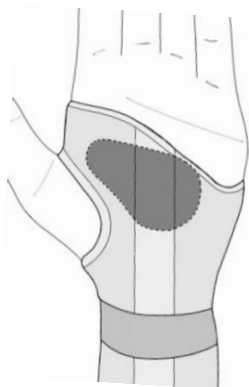




②

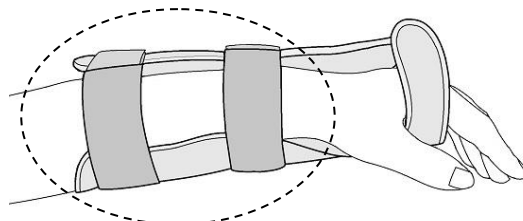

③

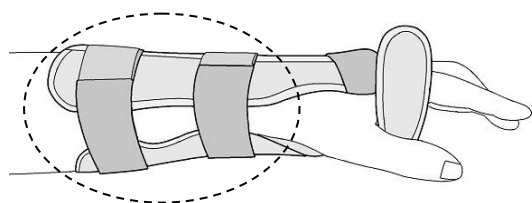

④

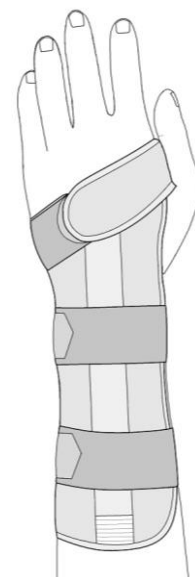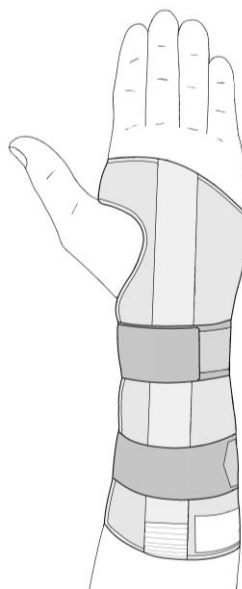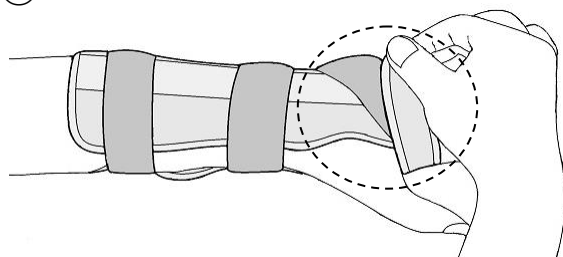

装着図

洗濯、お手入れについて

- 洗濯の際は、必ず本体から支柱を取り出し、中性洗剤で手洗いし、よく水気を切り、陰干ししてください。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないでください。
- 乾燥後、支柱の形状をよく確認し、上下、前後、表裏を間違えないように入れ直してください。
- ご使用中に汗や水などで支柱が濡れた場合は支柱を取り出し、タオルなどで水気をふき取ってください。濡れたままでのご使用は、錆の原因となります。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

 **中村ブレイス株式会社**

本社 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018